


User Manual


Ver.1.0.1

デジタル耳かきスコープ

レンズプローブ

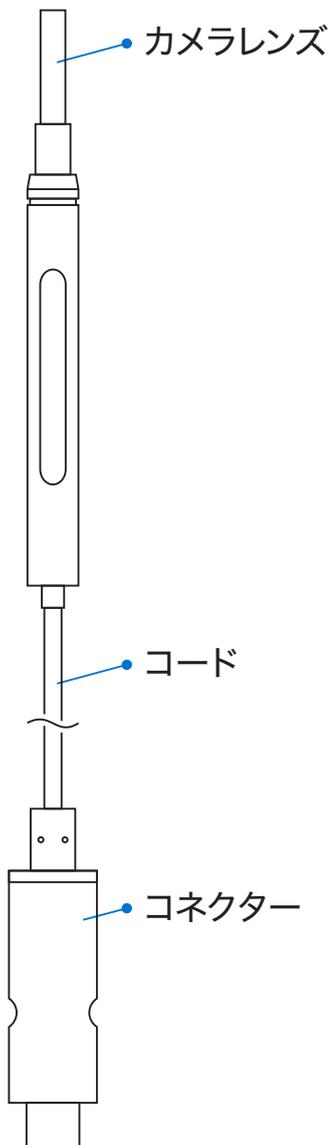

本体

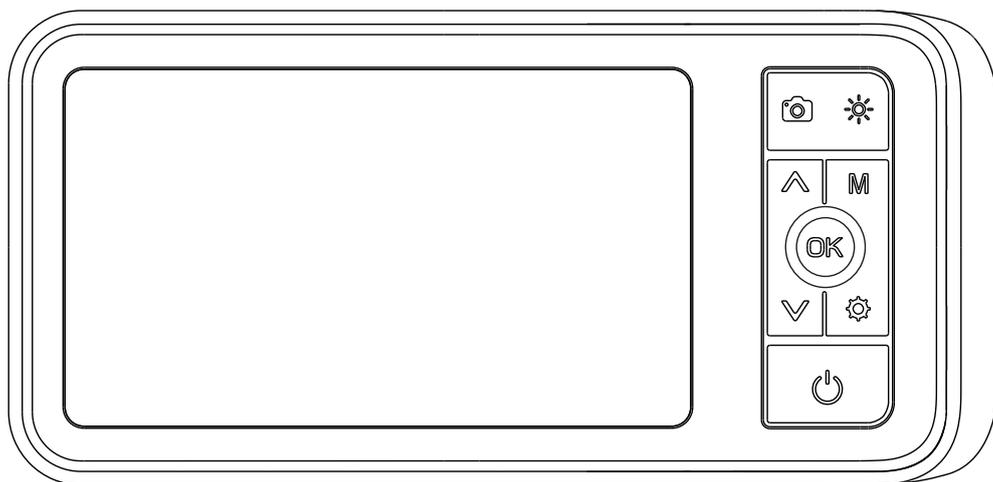

ガイドカバー(3個)



耳かき(4種)



ディスプレイスタンド



その他の付属品

クリーナーシート



綿棒



USBケーブル (type-C)



商品について

- ・本製品は4.5インチ高画質(IPS)カラー液晶ディスプレイ搭載の耳かきスコープです。
 - ・本体は人間工学デザインを採用することにより、主要な操作を片手でも行うことが可能です。
 - ・静止画、動画撮影を行い、microSDに保存することができます。
- ※ 本製品は医療機器ではありません。


安全にお使いいただくために

- ・本体、付属品をよく消毒してから使用してください。
- ・手洗いを行ってから、清潔な状態で使用してください。
- ・使用いただく際には、周囲の安全にもご配慮いただき、事故のないよう注意してください。

本体の充電


- ・ご使用前にお手持ちのUSB電源アダプター(5V)を使用し、本体を充電してください。
- ・本製品は、外部電源として充電しながらの使用が可能です。
※PC接続の場合は、カメラは使用できません。
- ・長期間使用しない場合は、完全放電を防ぐため少なくとも3か月に一度の充電を行うようにしてください。

各部名称 (正面)

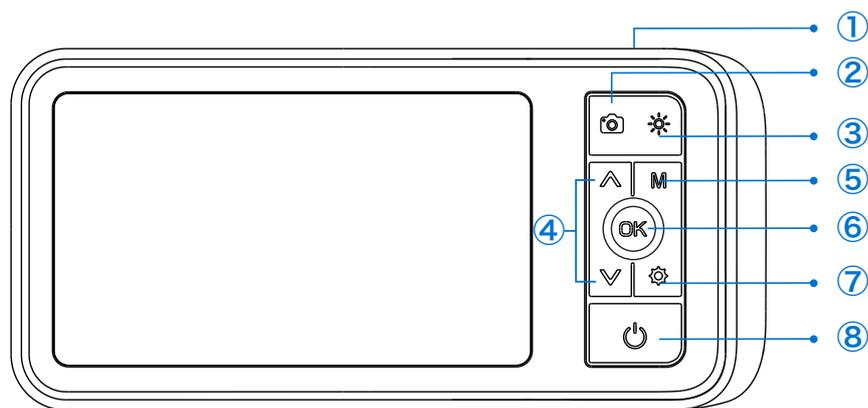


- ① レンズプロローブ端子
- ② 撮影ボタン
 - ・ 静止画モード: 撮影
 - ・ 動画モード : 録画スタート&ストップ
- ③ カメラライトボタン
 - ・ 明/中/暗/オフ
- ④ 上下送りボタン
 - ・ ファイル送り、メニュー送り
 - ・ 【撮影時】 ↑: 画像拡大: ×1.3/×1.5/等倍
 - ↓: 画像の180度回転
- ⑤ モード切換えボタン
 - ・ 静止画モード/動画モード/再生モード
- ⑥ OK(決定)ボタン
 - ・ 撮影時画面ホールド、メニュー決定
- ⑦ 設定ボタン
 - ・ 撮影設定/基本設定/設定画面オフ
- ⑧ 電源ボタン
 - ・ オン/オフ(長押し)

各部名称 (背面)

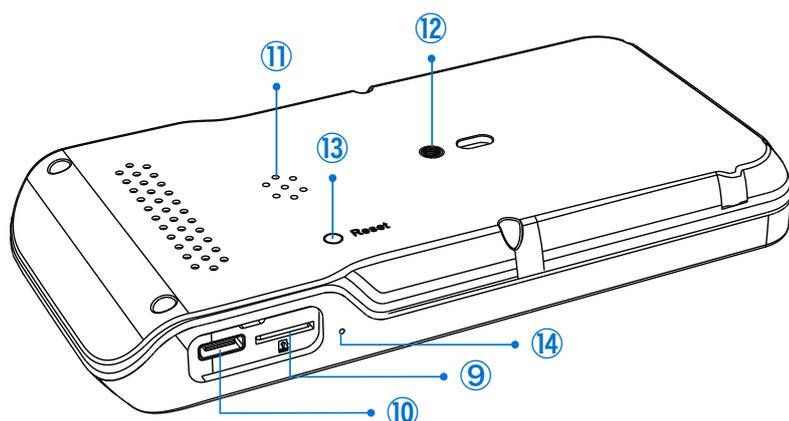


- ⑨ microSD カードスロット
- ⑩ USB 充電ポート (type-C)
- ⑪ スピーカー
- ⑫ ディスプレースタンド取付け穴
- ⑬ リセットボタン
- ⑭ マイク

使用方法

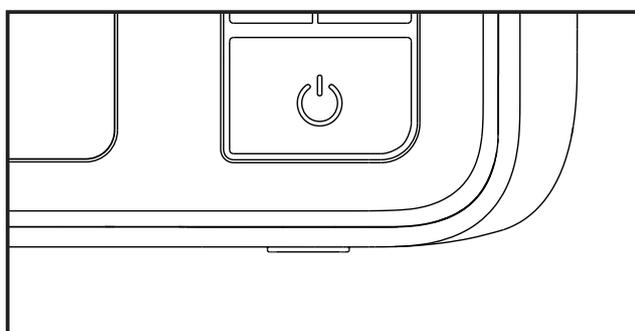


電源ボタンの長押しで、電源のオン/オフが切替ります。


- ・ 電源オン: 青ランプ点灯
- ・ 充電中 : 赤ランプ点滅 / 充電完了: 消灯

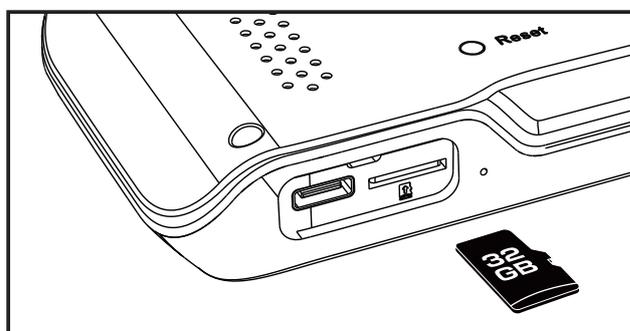

本体には、microSDカード(32GB)が付属し、セット済みになっています。着脱の際は本体の電源を切り、カードを軽く押し込むと外せる状態になります。カードに保存した静止画や動画をPCに保存することができます。

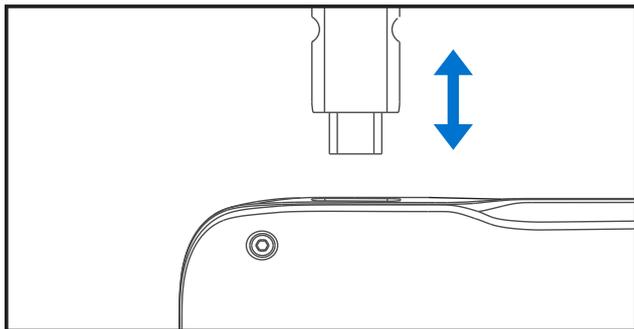

- ・ レンズプローブのコネクターを本体のレンズプローブ端子差し込みます。
- ・ 故障の原因となりますので、着脱の際はコネクター部分を持つようにし、コードを引っ張らないようにしてください。

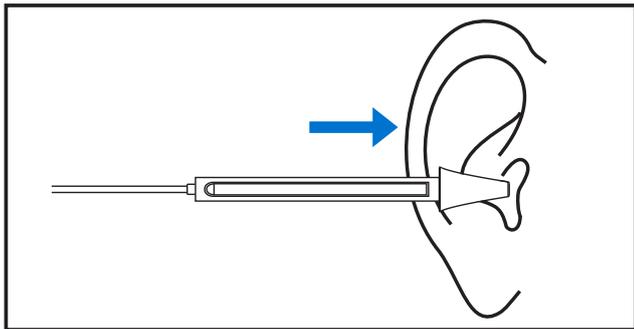

- ・ 耳の内部を見るときには、事故のないよう、ゆっくりと慎重に操作を行ってください。
- ・ カメラライトボタンで、レンズプローブ先端のLEDライトの明るさを調節できます。(押すたびに、明/中/暗/オフ)
- ・ カメラの焦点距離は約2~3cmに固定されています。画像が見えにくい場合は、距離を調整して焦点を合わせてください。

ご注意

- ・ レンズプローブの先端に保護キャップがついている場合があります。その場合は、ご使用前に取り外してください。
- ・ microSDカードの取外しの際は、本体の電源をオフにした状態で行ってください。また、装着する向きに注意して挿入し、無理な力を加えないように注意してください。


画面について

モード切換ボタンを押すとステータスが切替ります。

M 静止画モード / 動画モード / 再生モード

microSDカードの有無を表示します。

バッテリーの状態を表示します。

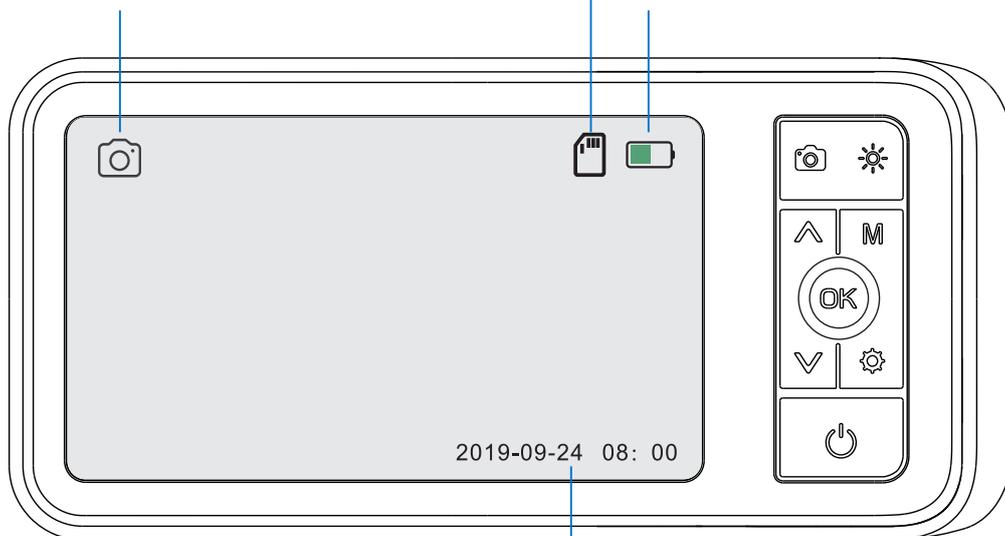

日付表示: 撮影設定のオンオフに関わらず表示します。

言語設定

- ・ 英語、中国語、日本語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ロシア語から選択できます。(初期設定:英語)
- ・ 設定ボタンを2回押して、機能設定画面に入ります。上下ボタンで選択し、OKボタンで決定します。(上下送りで次ページ目を表示します。)

撮影と再生

- M** モード切換えボタンを押すたびに、<静止画モードー動画モードー再生モード>に切換えます。

撮影(静止画 / 動画)



- M** モード切換えボタンで撮影モードにします。静止画モード、動画モードを選びます。

- 📷** 撮影ボタン
 - ・ 静止画モード → 撮影
 - ・ 動画モード → 録画開始 / 録画停止


再生



- M** モード切換えボタンで再生モードにします。
- ⬆** 上下送りボタンで画像、または動画を選びます。
- ⬇** 動画の場合は、OKボタンで再生スタートします。
- ⚙** 設定ボタンで、削除、保護、スライドショーが、選べます。


撮影データをPCに保存する

- ① microSDカードから直接読み込む場合
お手持ちのカードリーダー等を使用してください。
- ② 本体をPCに接続する場合
レンズプローブを外してください。
USB充電ポートとPCをUSBケーブルで接続します。

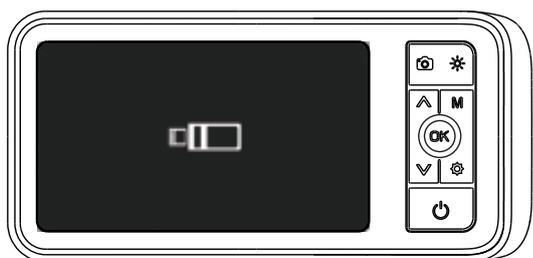


A

B

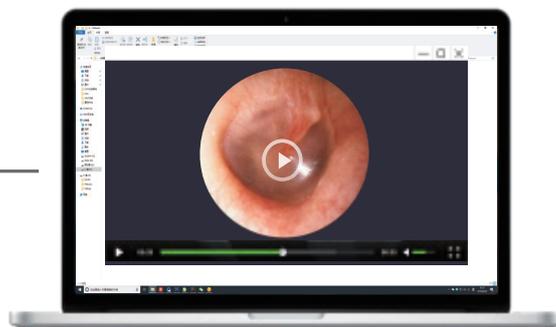

※ 接続した状態で、本体の電源をオン:ファイル転送 / 電源をオフ:充電

仕様

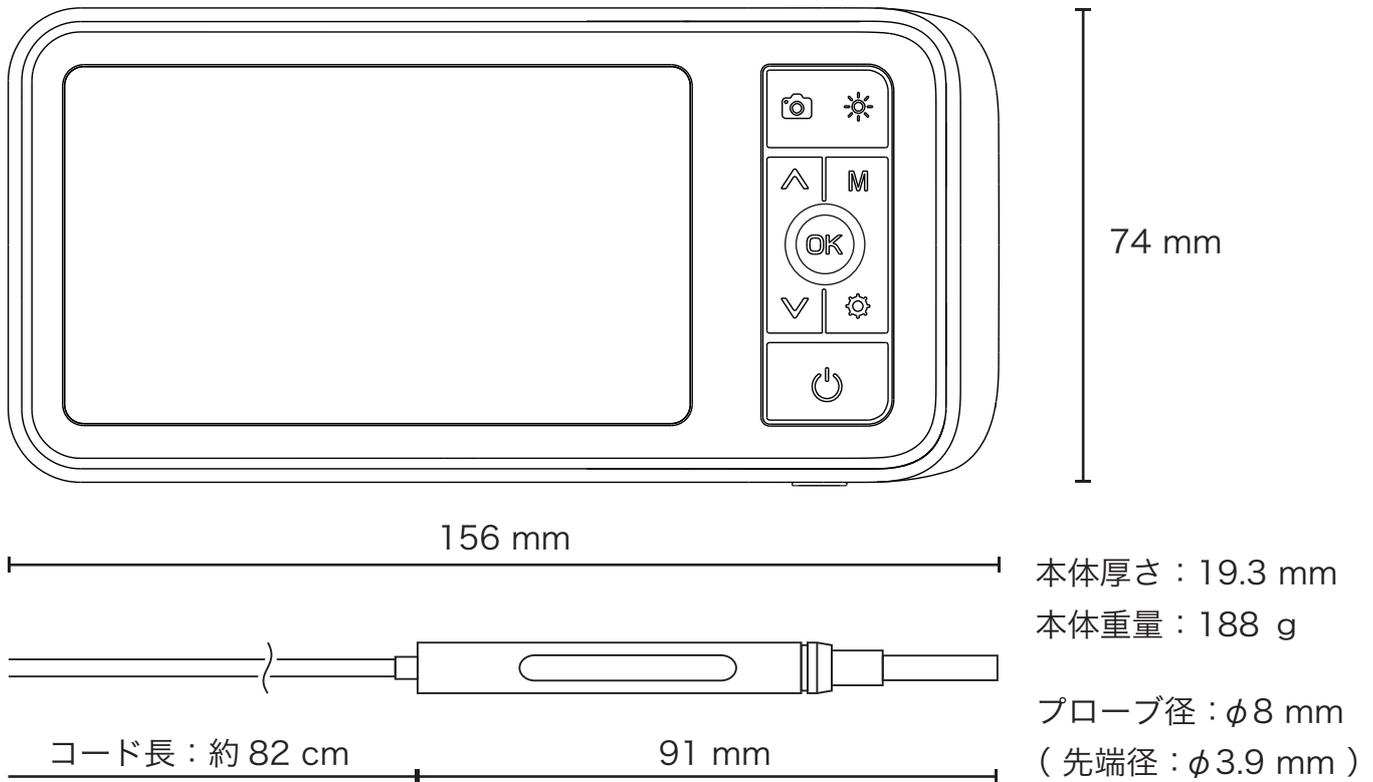

本体

4.5インチ IPS カラー液晶ディスプレイ

画素数 : 854×480 pixel

静止画解像度 : 1920×1080 pixel

動画解像度 : 1920×1080 pixel, 1280×720 pixel

ポート : USB 充電ポート (type-C)

: microSDカードスロット

カメラ

レンズプローブ先端径 : φ3.9mm

解像度 : 100万画素

視野角 : 70°

焦点距離 : 20~30mm

光源 : LEDランプ 6個 (調節可能)

その他

動作温度 : 0~45°C

電池 : リチウム電池 2500mAh

最大使用時間 : 約3~4時間

充電時間 : 約3~4時間

付属品

- ・ 取扱説明書
- ・ レンズプローブ
- ・ ガイドカバー 3個
- ・ 耳かき 4種
- ・ ディスプレースタンド
- ・ microSDカード (32GB) : 本体セット済み
- ・ クリーナーシート / 綿棒
- ・ USBケーブル (type-C)

ご使用前に必ず充電を行ってください。

⚠️ ご注意

- 電源ONの直後は内部で起動処理を行っていますので、待機状態になるまで待ってからボタン操作を行ってください。
- 感電や故障の原因になりますので、また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- USBケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
- 本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。

保 証 規 約

【1】保証期間は、お買い上げの日から1ヶ月です。

保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・レシートや納品書等）がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

【2】保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

- A. 商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。
- B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
- C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
- D. 改造等の保証外動作を行った場合。
- E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
- F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
- G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修繕を試み他の製品に損害を与えた場合。
- H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
- I. 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。
- J. 日本国外で使用された場合。

【3】免責事項

- A. いかなる場合においても、内蔵メモリまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
- B. 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
- C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
- D. 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、実際に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
- E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

【瑕疵担保責任に関する特約】

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとします。法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。

| | | | | |
|-------------------|-------|---|--|------------------|
| お買い上げ日 (商品到着日) | | | | 領収書・納品書(コピー) 添付欄 |
| ※お客様 | お名前 | 様 | | |
| | ご住所 | 〒 | | |
| | お電話番号 | | | |

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。
購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合
保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。



ホーム&セキュア お問い合わせ

株式会社ダイトク 技術サポート
〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷4-8-6
サポートメール: support@daitoku-p.co.jp

お問い合わせフォーム
<https://ws.formzu.net/dist/S7593291/>

