

RS-SO-749

ひろげてストレッチャー

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本製品を安全に正しくお使いいただくために、必ず事前に本書をよくお読みになり十分ご理解ください。

本書には保証書が付いていますので大切に保管してください。

本製品は一般家庭用です。医療用としてのご使用はご遠慮ください。




フェーズフリー認証製品です



身のまわりにあるモノやサービスを、
日常時はもちろん、非常時にも役立つ
ようにデザインしようという考え方、
それが「フェーズフリー」です。



■ 外観・各部名称

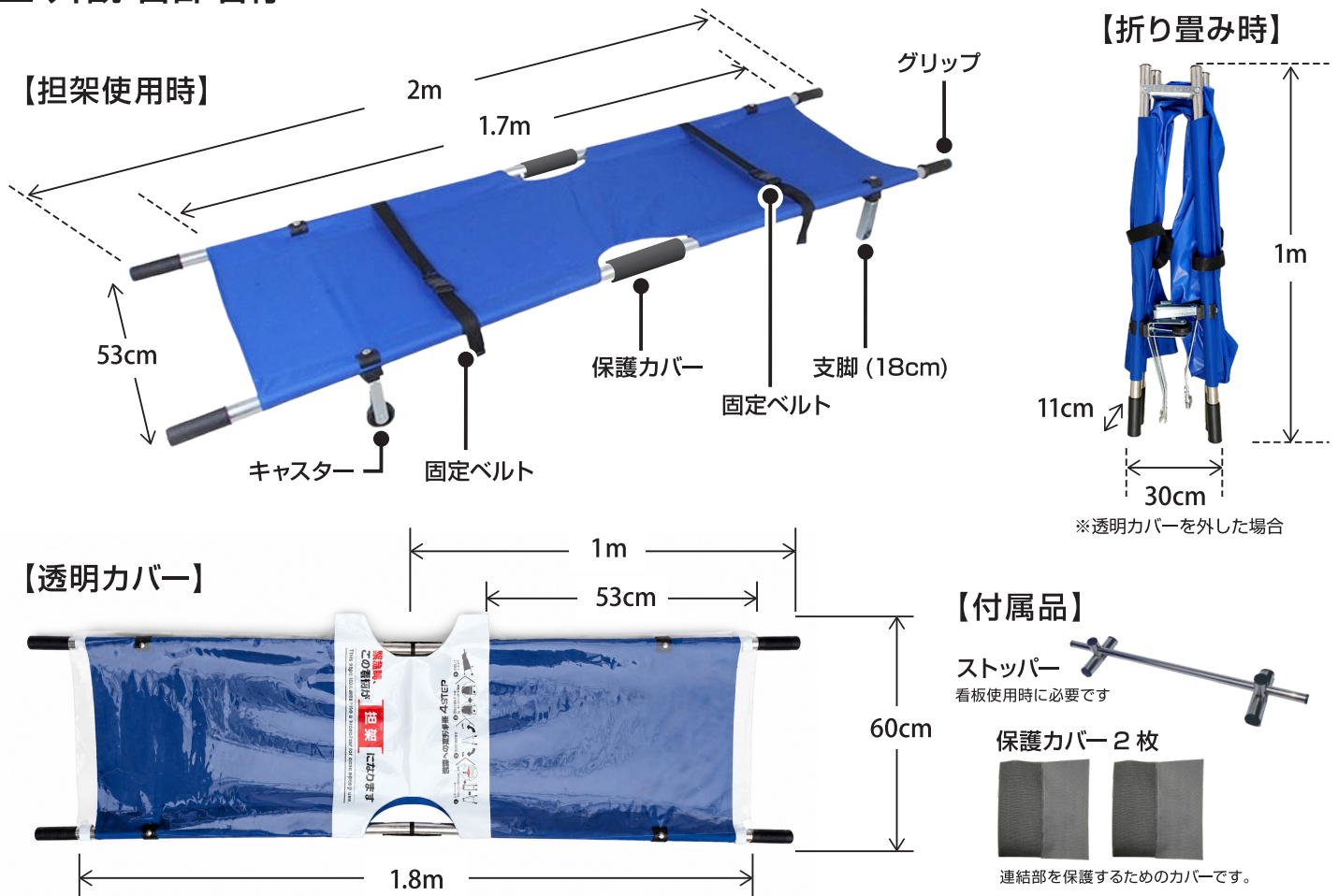

製品重量：6.4kg 耐荷重：120kg

材質：ステンレス、ポリエステル（オックスフォード）、ポリ塩化ビニール（PVC）

看板使用時

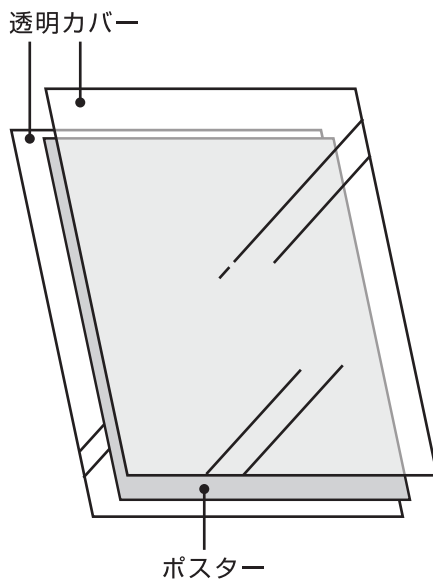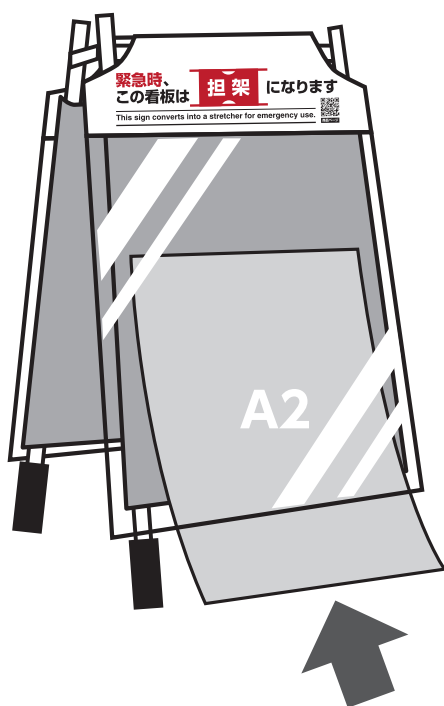

透明カバーは二重になっています。お知らせや、案内、ポスターを透明カバーの間に、挟んで入れます。摩擦により固定されます。
(A2 サイズが適当です)

POINT1

面ファスナーでカバーをしっかりと固定します。



POINT2

固定ベルトをクロスして留め、安定性アップ



担架に変形する方法


●ご使用前に、次の確認を行ってください。

- ・各部の破損、フレームのゆがみや、ボルトなどの部品の脱落はないか。
- ・付属品は揃っているか。

※万が一異常があった場合は、すぐにお買い求めの販売店へご連絡ください。

担架への変形手順 4STEP


① ストッパーを持ち上げながら外します

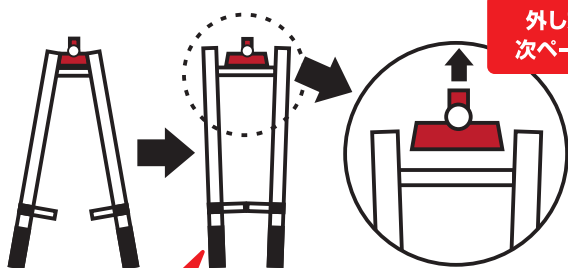

外し方は
次ページ→


支柱をまっすぐにしてください

② 左右に開きます

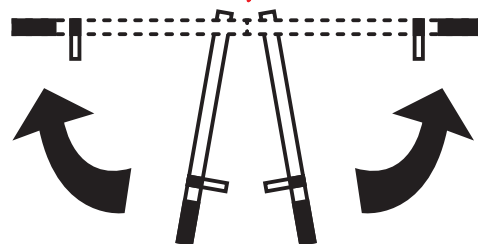


【注意】
連結部に指をはさまないように
注意してください

③ 裏側の連結バーをまっすぐにします (両端)

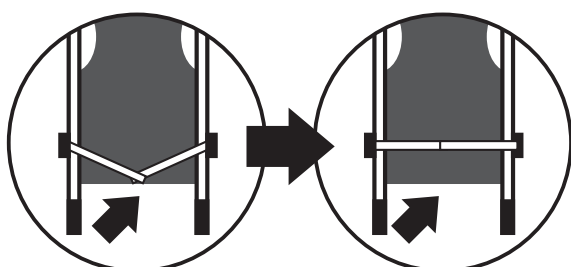

④ 裏返して完成です

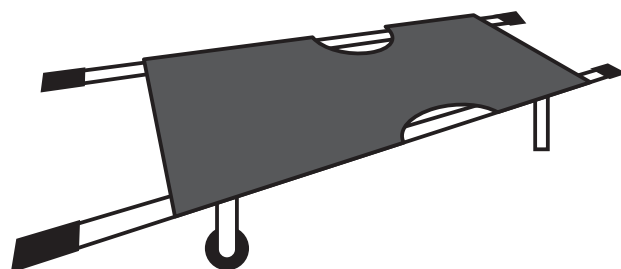

ストッパーの外し方のコツ




身支柱をまっすぐにした後、ストッパーの左右についている短いバーの手前に親指を当てるように持つ。



上の写真のように、手前を親指で押しながら、奥を持ち上げるようにする。




奥が外れたら、上にあげ、手前も外す。

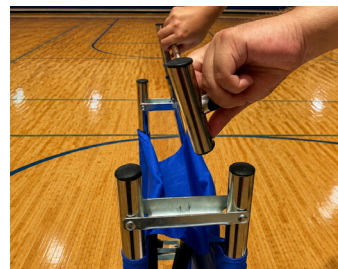

ストッパーを外したら、看板を使用する際に必要になりますので、なくさないように保管してください。

看板を使用する際は、ストッパーを付けてください

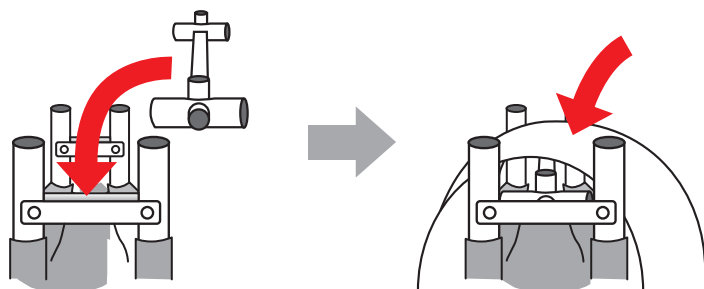

透明カバーをかけたまま、ストッパーを取り外すこともできます。



看板として使用する際は、ストッパーを取り付けてから、透明カバーを被せてください。

担架時使用方法

●対象者または荷物等の移動補助方法

①対象者または荷物等を本製品の上にバランスをとって配置します。

※安全な移動のため、防災訓練等の指示や、現場責任者の判断に従って使用してください。

②固定ベルトの長さを対象者または対象の荷物等に合わせて調節し、その上でバックルを差し込みます。

③ベルトを締めて対象者または対象の荷物等をしっかりと固定してください。

④慎重に持ち上げ、移動させてください。

定期点検

定期的に以下の項目を確認し、安全点検を行ってください。

- ・各連結部のピン、ボルト、ナットの緩みや脱落がないか。
- ・シートのキズ、破損がないか。
- ・車輪の破損や摩擦による極度のすり減りがないか。
- ・フレームにゆがみがないか。

ご使用上の注意

- 本製品は災害時の避難や、自力での移動が困難な方のサポート、または資材等の運搬を目的とした運搬具です。本来の目的以外に使用しないでください。
- 本製品を分解したり、改造したりしないでください。安全性が低下し、事故の原因となります。
- 固定ベルトや各部に緩みやがたつきがない事を確認してください。緩みやがたつきがあった場合、違和感を感じた場合には使用を中止してください。
- 連結バーの可動部に手を挟まないよう注意してください。
- 運搬時は必ず付属の固定ベルトを使用し、対象者または対象の荷物等をしっかりと固定してください。
- 本製品を使用して運搬する際には、なるべく2名以上で行ってください。
- 1人でも運搬することが可能ですが、運搬する際には対象者に恐怖や危険を与えるような角度で運搬しないよう、または荷物等が転げ落ちないよう、十分に注意してください。また、運搬する際はゆっくりと運搬してください。
- 本製品の上で立ち上がらないでください。転落事故の原因となります。
- 運搬中、片側を高く上げたりしないでください。けがや転落事故の原因となります。
- 本製品を火気に近づけないでください。火災や火傷などの原因となります。

お手入れ方法

- 薄めた中性洗剤をスポンジややわらかい布にしみ込ませて汚れを取り、乾いた布でから拭きして下さい。
- 強い酸性・アルカリ性洗剤、塩素系、シンナー、およびクレンザーなどの使用は、製品の変色や傷みの原因となりますので使用しないで下さい。
- 長期間使用しない場合は、汚れを落とし直射日光の当たらない場所で保管して下さい。

折りたたんで収納する際は、ご注意ください



×(誤った例)

折りたたむ際、シートを連結部に挟まないようにご注意ください。

シートが破れる可能性があります。



○(正しい例)

連結部にシートが挟まっていないことを確認してから、保管してください。

保証規約

- [1] 保証期間は、お買い上げの日から6ヶ月です。
保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・レシートや納品書等）がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。
- [2] 保証適用除外事項について
次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。
- A.商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。
B.保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
C.譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
D.改造等の保証外動作を行った場合。
E.製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
F.落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
G.不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
H.製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
- I. 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。
J.日本国外で使用された場合。
- [3] 免責事項
A.輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
B.法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
C.製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
- 【瑕疵担保責任に関する特約】
商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。

お買い上げ日 (商品到着日)				領収書・納品書(コピー) 添付欄
※ お 客 様	お名前			
	〒			
	ご住所			
お電話番号				

この製品保証書は上記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。
購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合
保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

お問い合わせ

株式会社ダイトク 技術サポート
〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷4-8-6
サポートメール: rakuten-support@daitoku-p.co.jp

お問い合わせフォーム
<https://ws.formzu.net/dist/S7593291/>

